

# INSTRUCTIE VOOR HET PLAATSEN VAN DE FLOCARE® INFINITY™ POMPSET

## STAP 1 Bereid de sondevoeding voor



Wacht tot de luchtbelletjes (schuim) zijn verdwenen.

## STAP 2 De Flocare® Infinity™ pompset plaatsen



1. Plaats de paarse siliconen lus voorzichtig om de rotor.
2. Trek zachtjes aan de cassette om deze in de pomp te plaatsen. Duw de cassette **naar beneden** en druk met duim en wijsvinger in het midden op de vrijliggende paarse tubing.



## STAP 3 Sluit de pompdeur stevig



Controleer of de pompset correct geplaatst is. **Duw de bovenkant van het deurtje met beide duimen iets naar beneden en sluit stevig aan beide zijden.**

## STAP 4 Vul de Infinity pompset



**Druk** gedurende 2 seconden op de **VUL SET-** toets om de pompset te vullen en alle lucht te verwijderen.

## BIJ LUCHT IN POMPSET (AIR ALARM)

1



**DEMP** of **BEVESTIG** het alarm.

2



Klik op de informatie toets voor informatie over het alarm en de oplossingen.

**A.** Controleer of het voedingsreservoir leeg is en vervang indien nodig.

**B.** Indien het voedingsreservoir niet leeg is en het alarm is terugkerend:

- Open de pompdeur, duw de cassette naar beneden en druk zachtjes met duim en wijsvinger in het midden op de vrijliggende paarse tubing, om er zeker van te zijn dat het goed op zijn plaats zit. Duw de bovenkant van het deurtje met beide duimen iets naar beneden en sluit stevig aan beide zijden.
- Als het alarm blijft bestaan, vervang dan de pompset.

3



Druk op de home-toets nadat alle aanbevolen acties zijn uitgevoerd.

4



(Her)start de voeding.



Kijk hier voor meer informatie over de Flocare® Infinity™ III pomp:



juli 2024